

 <b>ADOR-EDELMETALLE</b>	<b>PRODUKTHAUPTAKTE</b>	Dokument-Nr.: Adorloy PF	Seite: 1 von 1
	<b>LEGIERUNGSDATENBLATT</b>	Revisionsstand: A/16.04.2020	

Legierung: **ADORLOY PF**

**CE0197**

<b>Typ:</b>	Hochgoldhaltige Dentalgusslegierung auf Goldbasis, Typ 4 (extrahart), gem. DIN EN ISO 22674
<b>Farbe:</b>	gelb

<b>Indikationen:</b>	Inlays, Onlays	•
	Kronen	•
	kleine Brücken	•
	Brücken jeder physiologischen Spannweite	•
	Fräs-, Konus- und Geschiebearbeiten	
	Modellguss	•

<b>Zusammensetzung:</b>	Au	71,00
(Massenanteile in %)	Pt	4,00
	Ir	0,10
	Ag	12,30
	Cu	12,10
	Zn	0,50

<b>Technische Daten:</b>	Dichte in g/cm <sup>3</sup>	15,4
	Vickershärte HV 5/30	(s) 260
	Dehngrenze R <sub>p0,2</sub> in MPa	(s) 670
	Bruchdehnung in %	(s) 13
	E-Modul in GPa	130
	Schmelzintervall in °C	890 – 940

<b>Verarbeitung:</b>	Vorwärmtemperatur der Gießformen in °C	700
	Gießtemperatur in °C	1090
	Tiegel	Grafit/Keramik
	Aushärten	nicht aushärtbar

<b>Geeignete Lote:</b>	Verbindungen als Gusslegierung	AL 800 PF
	Verbindungen als Gusslegierung	AL 750

1) Kurzbezeichnungen:

s - Selbstaushärtung, n - nach dem Keramikbrand, a-s – ausgehärtet aus dem Zustand s  
a-n – ausgehärtet aus dem Zustand n

2) alle Angaben zum ausgehärteten Zustand erfolgten je nach Legierung:

- Oxidbrand 10min/ 960°C + 4x4min/ 960°C bei gelben, konventionellen Aufbrennlegierungen
  - Oxidbrand 10min/ 980°C + 4x4min/ 980°C bei weißen, konventionellen Aufbrennlegierungen
  - Oxidbrand 10min/ 800°C + 4x4min/ 800°C bei LFC- Systemen
- Entsprechende Wertangaben gelten nur unter diesen Bedingungen.

3) Der Keramikbrand sollte nach Angaben des Keramikherstellers durchgeführt werden.

